


CardioTeam Neo Monitor

Low cost Cardioskop / Saturationsmonitor simulator til genoplivningstræning:

- Målgruppe: teamtræning på fødestue ell. anden akut neonatal resuscitation.
- Simpel betjening ved scenarieleder.
- Software: gratis.
- Hardware: almindelig standard bærbær PC + trådløst numerisk tastatur.
- Kræver ikke installation. Kan køre f.eks. fra en USB-stick.

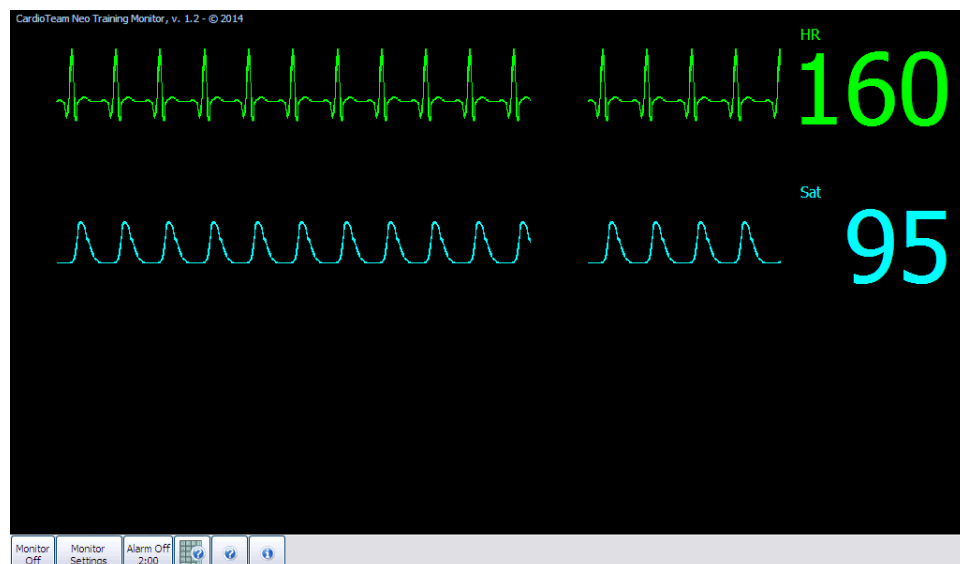

Konfigureringsmuligheder:

CardioTeam Neo Monitor Settings

Alarm ved lav HR/lav Sat

HR gul alarm <

HR rød alarm <

Sat gul alarm <

Sat rød alarm <

Alarmlyd: Lyd 1 Lyd 2 Ingen

Alarm flash cyklus ms

Alarm afstilling: 1 min 2 min

Auto re-etablér tabt signalvisning ved stigende HR/Sat-værdi

Auto re-etablér tabt signalvisning ved faldende HR/Sat-værdi

1% sat-trin ned til saturations-%:
 90 85 80 75 70

Automatisk Sat-reduktion ved faldende HR

Faldende HR:	Sat. max.:
100/min >>	<input type="text" value="90"/>
90/min >>	<input type="text" value="80"/>
80/min >>	<input type="text" value="70"/>
70/min >>	<input type="text" value="60"/>
60/min >>	<input type="text" value="50"/>
50/min >>	<input type="text" value="40"/>
40/min >>	<input type="text" value="30"/>


Sat-udfald ved HR <

Auto-skjul muse-cursor (genkaldes ved at trække musen op fra skærmens bund)

Programmet kan hentes som pakket zip-fil **CTNeoMonitor.zip** fra:

<http://www.nknabe.dk>

Betjening via (trådløst) numerisk tastatur:

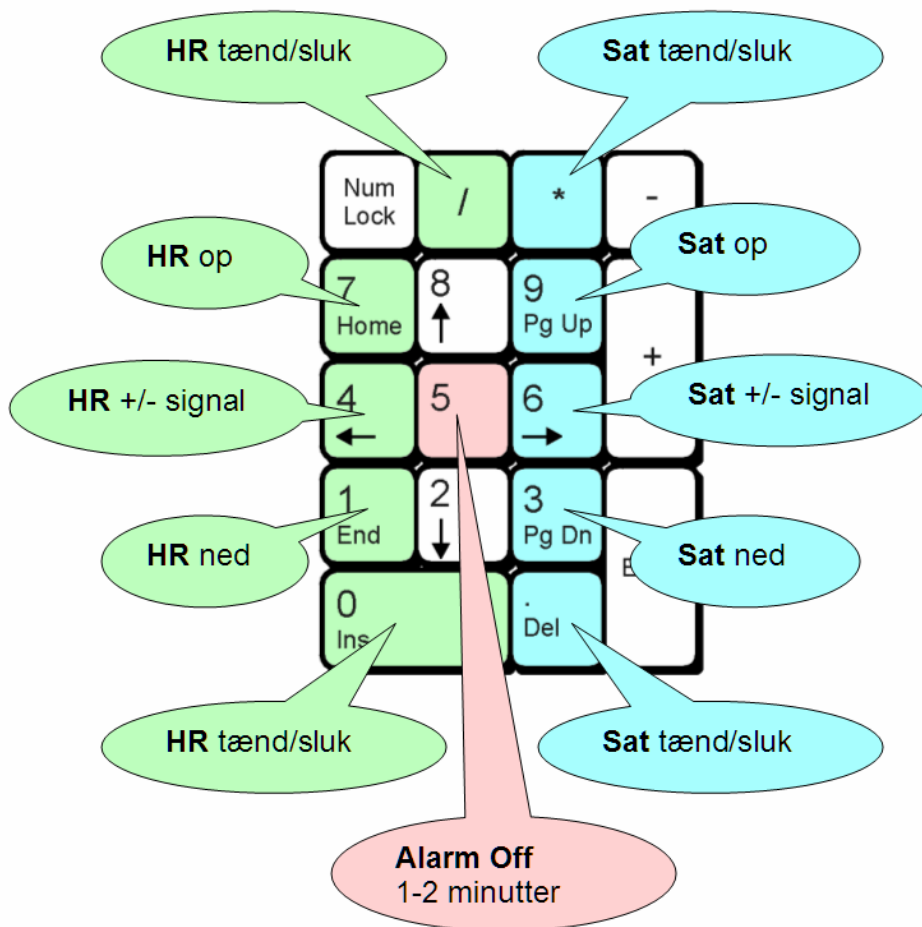

Alarmafstilling 1 – 2 minutter via [5]-tasten forudsætter NumLock tilstand af det numeriske tastatur.

På PC'en kan alarm også til-/fra-kobles via [Esc] samt afstilles med [Mellemlumstangent].

